

SPIRO - mascherina chirurgica lavabile di Classe I Tipo I



SPIRO - mascherina chirurgica lavabile di Classe I Tipo I

MASCHERINA CHIRURGICA - RIUTILIZZABILE – Lavabile più di 20 volte; in questo modo si *riduce* l'immissione di **plastica nell'ambiente**

PERSONALIZZAZIONE – Disegni, loghi e testi JACQUARD in raso personalizzabili e realizzabili su ordinazione


RASO ELEGANTE - Il tessuto esterno è stato sviluppato per consentire più di 20 lavaggi mantenendo alte le prestazioni di filtrazione batterica (al 96.5%) e traspirabilità; oltre ad abbellire l'aspetto della mascherina

AMPIA GAMMA COLORI - Possibilità di scegliere i colori tra quelli disponibili

CONFORTEVOLE - Grazie alla forma ed all'elastico Made in Italy

TRASPIRANTE - Realizzato con raso ed altri materiali di alta qualità che consentono il passaggio dell'aria

ALTA EFFICIENZA DI FILTRAZIONE BATTERICA (BFE) - 97%

APPROVATO  – norma tecnica **UNI EN 14683**

MADE IN ITALY - Progettato e realizzato in Italia

SPiRO - mascherina chirurgica lavabile di Classe I Tipo I



=



MASCHERINA CHIRURGICA - RIUTILIZZABILE – Lavabile più di **20 volte**; in questo modo si **RIDUCE** l'immissione di **PLASTICA NELL'AMBIENTE**



SPiRO - Mascherina chirurgica riutilizzabile Classe I, Tipo I

Modello: 20MAS20

ISTRUZIONI PER L'USO:

Prima di indossare la mascherina:

- Lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l'igiene delle mani con soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi;
- Rimuovere la mascherina dalla confezione, raccoglierla solo utilizzando gli elastici e avendo cura di non toccare la mascherina stessa;
- Assicursi che la mascherina copra completamente naso e bocca. Posizionare correttamente la mascherina aprendola, in modo che copra il mento e facendo aderire il ferretto superiore per adattarlo alla forma del naso;
- Accertarsi di averla indossata nel verso giusto (la parte colorata è quella esterna).

Durante l'uso:

- Se si deve spostare la mascherina manipolarla sempre utilizzando gli elastici;
- Se durante l'uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l'igiene delle mani;
- non riporre la mascherina in tasca e non appoggiarla su mobili o ripiani.

Quando si rimuove:

- Manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici;
- Lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l'igiene delle mani con una soluzione alcolica.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:

- Mettere la mascherina a bagno in 2 litri di acqua a 30°C con 10 ml di candeggina commerciale ad uso domestico (5%) per 20min. Le quantità di acqua e candeggina possono variare mantenendo invariate le proporzioni.
- Risciacquare abbondantemente sotto acqua corrente.
- Asciugare in piano a temperatura ambiente, al riparo dalla luce solare diretta. **NON** asciugare in asciugatrice. **NON** stirare. Lavabile fino a **20 volte**.



Dichiarazione di Conformità del Fabbricante alla Direttiva 93/42/CEE

Il fabbricante

Ragione Sociale	VIBE RESEARCH SRL
Indirizzo	Via Giovanni XXIII, 182 – 21010 Cardano al Campo (Va)

Dichiara sotto la sua responsabilità che il dispositivo medico

Nome	SPiRO
Modello	Mascherina Chirurgica Riutilizzabile SPiRO
Matricola/serie	20MAS20
Classe	I Tipo I

Soddisfa tutte le disposizioni della direttiva 93/42/CEE che lo riguardano

Norme armonizzate o nazionali applicate, altri documenti normativi applicati

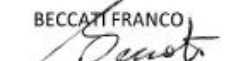
UNI EN 14683:2019	Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova
-------------------	---

Procedimento di valutazione della conformità applicato: ALLEGATO VII DIRETTIVA 93/42/CEE

Gallarate, 03 Settembre 2020

Legale Rappresentante

BECCATI FRANCO


VIBE RESEARCH SRL

Via Giovanni XXIII, 182
21010 CARDANO AL CAMPO (VA)
C.F. e P.IVA 03462190129 - REA VA 353266
C.S. 15000,00 I.V.
Tel. 0331 262565 - Fax 0331 264371
PEC: viberesearch@legalmail.it